

WERKSTOFFE • ZUSAMMENSETZUNG • SICHERHEITSHINWEISE

Produktgruppe: FEMAdent smartcontrol SYSTEM

Artikel, REF-Nr.:	10000-... 10005-...	10010-... 10011-... 10015-...	10016-... 100100-... 100105-...	100111-... 100115..., 100116...,	20000..., 20001..., 20003...
-------------------	------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------------

Produktgruppe: FEMAdent smartcontrol SYSTEM PLUS

Artikel, REF-Nr.:	100101-... 100201-...	100301-... 100401-... 100501-...	100601-... 100701-... 100801-...	102001-... 103101-... 103201-...	102501-... 102601-...
-------------------	--------------------------	--	--	--	--------------------------

Werkstoff	Zusammensetzung (Angaben in Gewichts-%)											
	Kupfer	Zink	Chrom	Nickel	Man- gan	Silicium	Phos- phor	Schwe- fel	Molyb- dän	Kohlen- stoff	Stick- stoff	Eisen
Neusilber	41-45	44-50	-	9-11	-	-	-	-	-	-	-	-
Rostfreier Stahl			17-19	8-10	1-2							69-74
Rostfreier Stahl DIN 1.4301	-	-	17-19,5	8-10,5	≤ 2	≤ 1	≤ 0,045	≤ 0,03	-	≤ 0,07	≤ 0,11	Rest
Rostfreier Stahl DIN 1.4305	≤ 1		17-19	8-10	≤ 2	≤ 1	≤ 0,045	0,1-0,4	-	≤ 0,1	≤ 0,11	Rest
Rostfreier Stahl DIN 1.4310	-	-	16-19	6,0-9,5	≤ 2	≤ 2	≤ 0,045	≤ 0,015	≤ 0,8	0,05-0,2	≤ 0,11	Rest

Kunststoff (Griffe, Platzhalter, Buchsen) Polyamid, NH(CH₂)₅CO und/oder Polyethylen, C₂H₄



Sicherheitshinweise



Anwendung

Das Produkt darf nur von dafür qualifiziertem und zugelassenem Personal verbaut und angewendet werden. Das Produkt ist ein Einmal-Produkt und darf nicht erneut angewendet werden. Die KFO-Apparatur, insbesondere die freiliegende(n) Stellschraube, Gewinde und Führungstifte müssen regelmäßig gereinigt und sauber gehalten werden, weil ansonsten Zahnstein, Kalk und Speisereste die Funktion der Schraube blockieren können.

Haut-/Schleimhautkontakt, Allergie

Die Schrauben enthalten Metalle (z.B. Nickel, Chrom, Zink, etc.), die bei sensibilisierten Personen/Patienten bei Kontakt Allergien auslösen können. Fragen Sie Ihre Patienten, ob sie auf im Produkt enthaltene Metalle allergisch sind. Im Falle einer Allergie bzw. allergischen Reaktionen darf die Behandlung mit dem Produkt nicht begonnen bzw. fortgesetzt werden. Bei Symptomen, den Patienten angemessener medizinischer Behandlung zuführen.

Verschlucken, Einatmen

Bei Verschlucken oder Einatmen von Schraubenteilen oder bei deren Eindringen in die Mundschleimhaut, den Patienten angemessener medizinischer Behandlung zuführen.

Handhabung, Lagerung, Transport

Keine besonderen Gefahren durch das Produkt, die Bestandteile, die chemische Zusammensetzung oder die Form oder die chemisch-physikalischen Eigenschaften. Die Verpackung und die Schrauben-Platzhalter/Griffe bestehen aus Kunststoff und sind dementsprechend normal brennbar. Übliche Vorsichtsmaßnahmen beim Brandschutz und bei der Brandbekämpfung beachten.

Entsorgung

Benutzte Schrauben sind zu entsorgen, wie bei gebrauchten Medizinprodukten in der Zahnarztpraxis üblich. Unbenutzte Schrauben und die Verpackung können über den regionalen Abfall- und Wertstoffkreislauf entsorgt werden.

Lagerung, Konservierung

Idealerweise bei normaler Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit und ohne größere Temperaturschwankungen trocken, schmutz- und staubfrei lagern.